


SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Testy pripravené na použitie, vždy keď potrebujete vedieť...

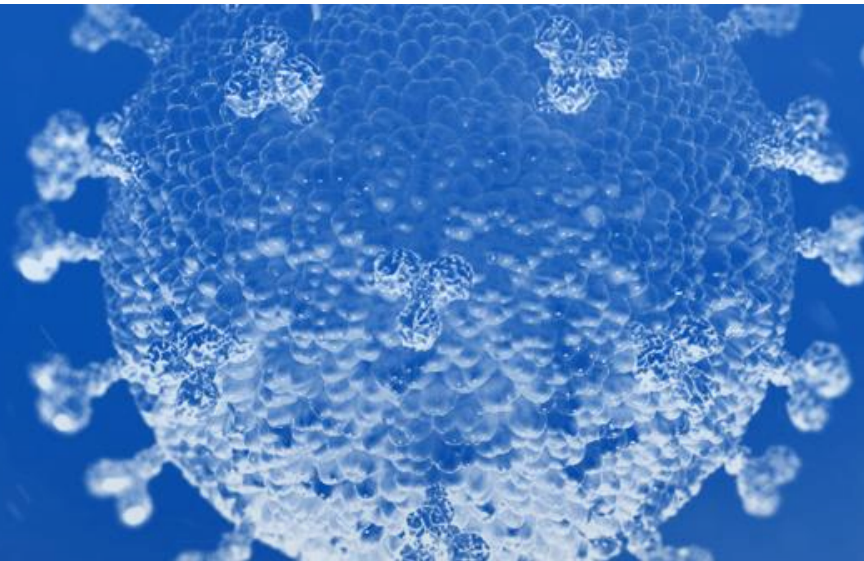

Vypuknutie pandémie vírusu SARS-CoV-2, ktorý spôsobuje COVID 19 viedie k množstvu otázok

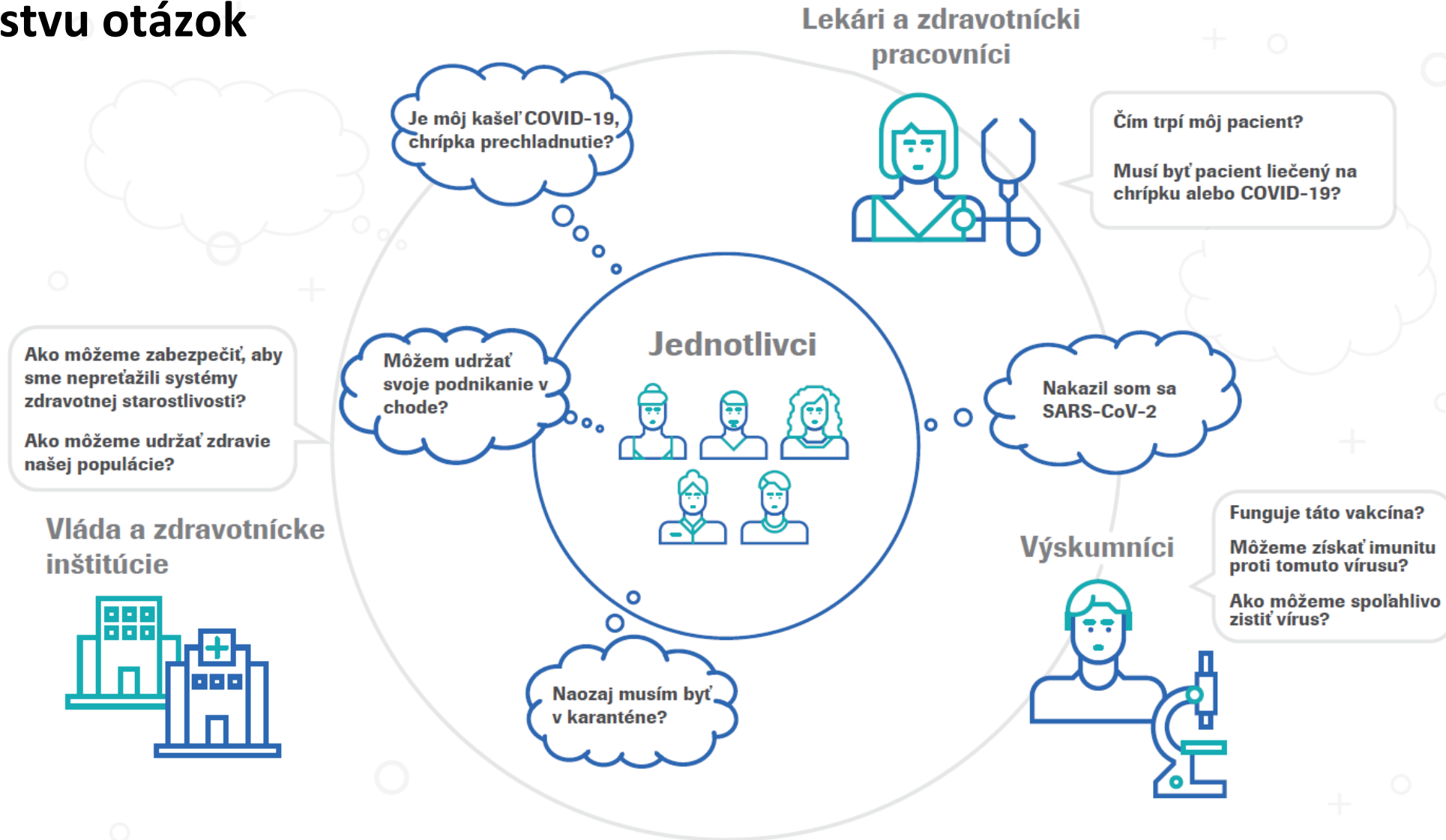

Diagnostika aktívnych infekcií si vyžaduje inú technológiu ako riadenie vyliečených infekcií.

SARS-CoV-2 infection

Testy slúžia na rôzne prípady použitia



Patogén

Je niekto aktívne infikovaný?
PCR a antigén testy:
Veľmi vysoká citlivosť



**Imunitná
odpoveď**
IgG, IgM, IgA

Mám protilátky?
Protilátkové testy:
Veľmi vysoká špecifickosť


SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test - použitie

Schválené pre krajiny akceptujúce označenie CE (IVDD)



Antigénový rýchlotest SARS-CoV-2 je rýchly imunotest na kvalitatívnu detekciu špecifických antigénov SARS-CoV-2 prítomných v ľudskom nosohltane. Tento test je určený na detekciu antigénu z vírusu SARS-CoV-2 u osôb podozrivých na COVID - 19.


Tento produkt je prísne určený na profesionálne použitie v laboratóriách a prostrediach Point of Care.

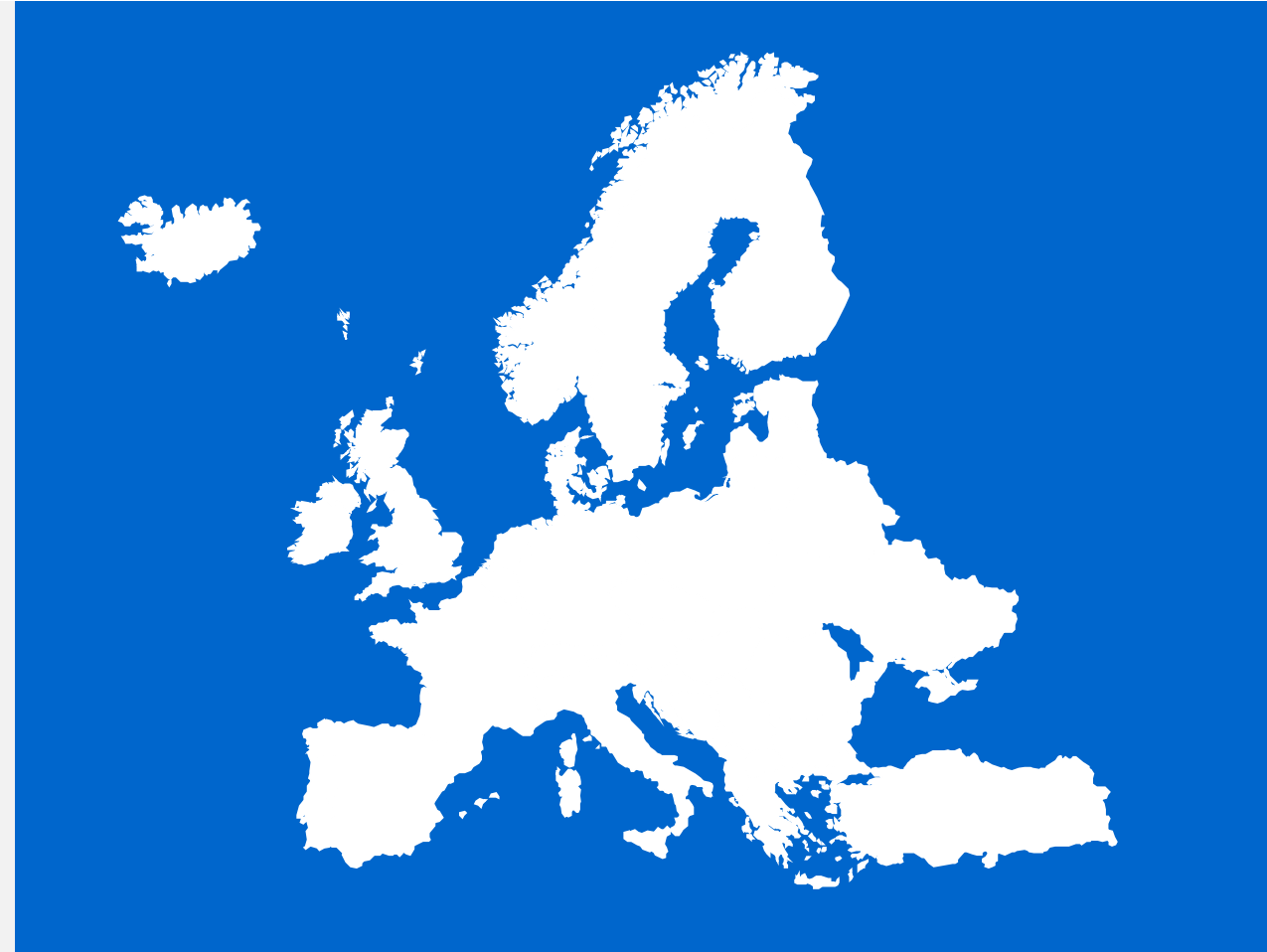

Vykonanie testu

Štyri jednoduché kroky s výsledkom do 15 - 30 minút


1

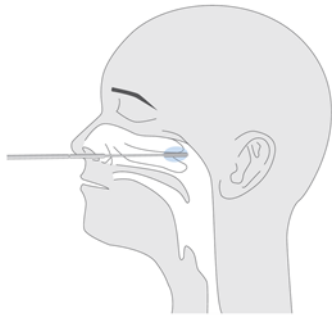

Výter z nosohltanu

Vložte sterilný tampón do nosovej diery pacienta a potrite povrch zadného nosohltanu. Vyberte tampón z nosnej dutiny.

2

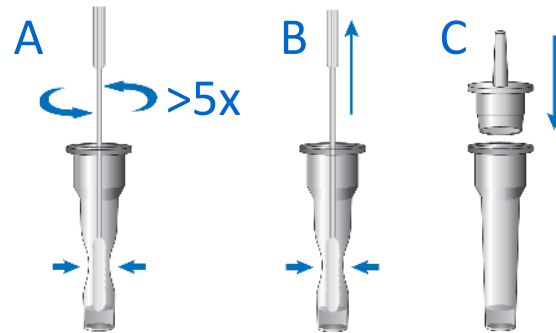

Príprava vzorky

A. Vložte tampón do skúmavky s extrakčným puфом, stlačte skúmavku a tampón premiešajte > 5x.

B. Vytiahnite tampón a súčasne stlačte bočné časti skúmavky.

C. Uzatvorte skúmavku priloženým vrchnákom.

3




Kvapka vzorky

Pridajte 3 kvapky extrahovanej vzorky do jamky na vzorku testovacieho zariadenia.

4


Výsledok 15-30 min

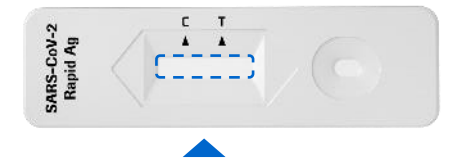

Odčítanie výsledku testu




Výsledok testu nečítajte po 30 minútach. Môže to viesť k nesprávnemu výsledku.

SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test

Otázky a odpovede

Spoločlivý antigénový rýchlotest SARS-CoV-2 poskytuje rýchle odpovede, kedykoľvek ich potrebujete.

?

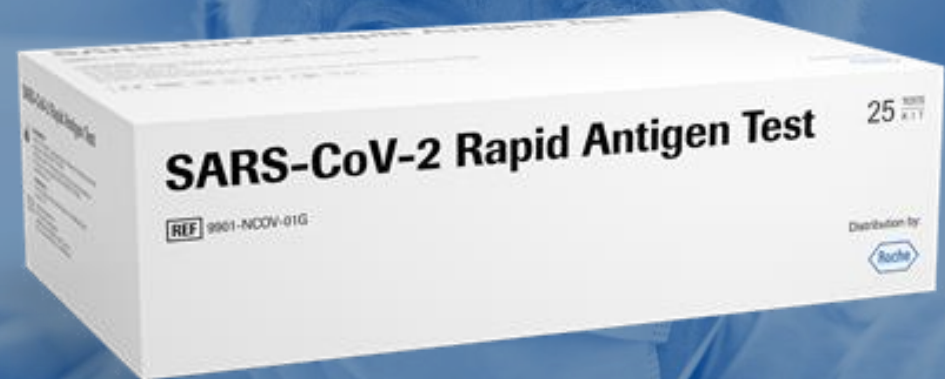

Testy pripravené na použitie, vždy keď potrebujete vedieť...

Kontakty

vždy keď potrebujete...



Patrik Danko

Roche Slovensko, s.r.o.
Pribinova 19
811 09 Bratislava

patrik.danko@roche.com

+421 905 311 610

Informácie

www.roche.sk

slovakia.covid@roche.com



Objednávky

slovakia.sap_logistics@roche.com



Doing now what patients need next